

產品名稱

側向移位輪椅

產品照片



內容物

型號:MH-4R-460

具輪椅頭靠系統、背部魔鬼氈可調系統、空中傾倒型輪椅一台

使用目的

一. 讓行動不便之個案乘坐, 一張好坐的椅子可以讓個案更願意乘坐, 避免因為椅子的不適而迫於躺回床上, 透過頭靠系統、魔鬼氈織帶順應背型, 不需要過多的綁帶來維持輪椅擺位。

二. 功能設計:

輪椅頭靠系統: 頭靠可前後、左右、上下進行位置調整, 以保持正確吞嚥姿勢。

背部魔鬼氈可調: 藉由調整魔鬼氈織帶, 能調整至順應背部形狀, 即使在放鬆狀態也能維持穩定坐姿

空中傾倒: 1. 協助將壓力從臀部分散到背部, 以避免壓瘡的產生。

2. 防止軀幹穩定性不佳個案乘坐輪椅時向前滑落。

仰躺: 1. 傾倒搭配仰躺讓背部更進一步放鬆, 仰躺最大可到 125 度。

2. 個案髖關節攣縮無法坐挺時可調整到合適角度 例如: 髖關節攣縮 120 度。

扶手設計: 扶手高度可調節至與座面等高, 向床上移動更便利。


可根據使用者情況調節扶手高度。

踏板設計: 可拆卸式踏板使得轉移位時, 不會造成阻礙。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)



圖 1

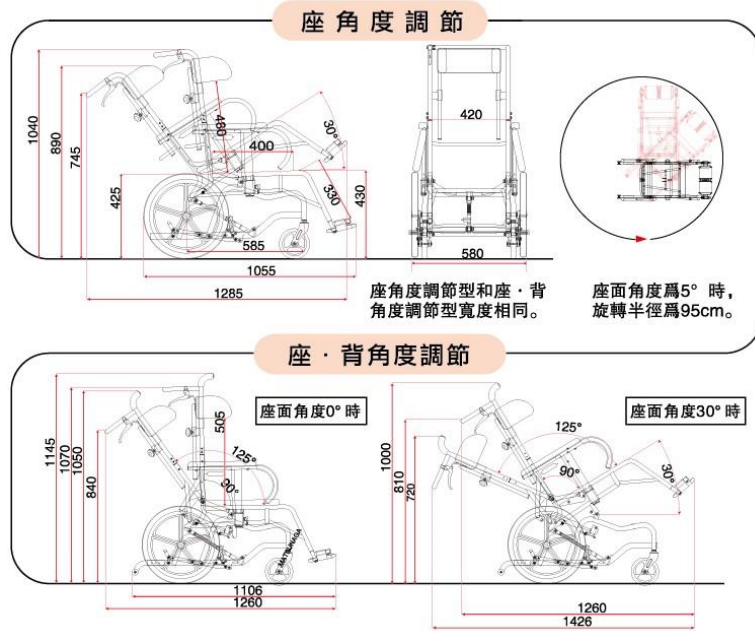

『空中傾倒』

第一步:操作右手邊灰色把手之後將輪椅向背部移動 即可完成『空中傾倒』。

第二步:若從傾倒姿勢要回端坐姿勢時。操作右邊灰色把手之後將輪椅朝前側移動即可。*如圖 1

『仰躺』

第一步:操作左邊黑色把手之後將輪椅向背部移動 即可完成『仰躺』。

第二步:若從仰躺要回端坐姿勢時。操作左邊黑色把手之後將輪椅朝前側移動即可。*如圖 1



圖 2

『扶手』

第一步:操作扶手下方按鈕向上撥之後將扶手向下/向上移動聽到”喀”一聲即為固定。*如圖 2



圖 3

『踏板』

第一步:解開腿靠帶

第二步:按壓紅圈處旋鈕後向外翻,即可拆卸腳踏板*如圖 3



前後均可將車輪鎖定的新型剎車

圖 4



圖 5

『煞車』

共有三處可以控制煞車：

1. 腳煞：兩後輪中間橫桿向下踩或向上踢，可以控制兩輪煞車開關。*如圖 4
2. 側煞：兩輪前端各有一個踩踏點，向下踩或向上踢可以控制單輪煞車。*如圖 4
3. 手煞：頭靠後方有兩個握把，分別能操控左、右輪的煞車。*如圖五

『頭靠系統』



圖六

第一步：旋開紅圈處旋鈕，頭靠可前後調整，調整至適當位置再將旋鈕轉緊即可。

第二步：轉動藍圈處把手，頭靠可 360 度旋轉，調整至適當位置後再將把手轉即可。*如圖七

注意事項

1. 操作後方把手時請一次操作 1 個即可，若同時操作 2 個功能會造成兩者都作動反而失去目的。
2. 個案起身/坐下前時請務必先將腳踏板收起，並且不可踩踏踏板上下輪椅 避免造成危險。
3. 下坡請倒退推行
4. 安全載重為 100KG