

產品名稱

移位輔助機

產品照片



內容物

型號:16090203

高背輪椅具仰躺、空中傾倒型移動式
沙發一台

使用目的

讓行動不便之個案能快速轉移位至所需載具上，另外可以提供被照顧者站立訓練，穿脫褲子、尿布等協助。

二. 功能設計：

助起帶：動滑輪的設計協助輕鬆省力的將病患拉起；內側防滑設計讓移位過程中安全不滑落；外側光滑材質讓吊帶穿脫仔入更輕鬆方便。

腿部支撐：有設計柔軟襯墊，讓使用者可以很舒適地靠在上面，且僅靠一隻手就能輕鬆操作高低調整。

握把設計：提供多種不同方式抓握，讓使用者更容易找到對的手勢。


腳踏板：低高度設計，不論要將腳放上或者進入床底都更輕鬆方便。

煞車：左右連動設計，只須採一邊就能輕鬆鎖住雙側輪子。


使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步…)

『操作步驟』


第一步：將移位機靠近個案，再把腳放上踏板。(如下圖)

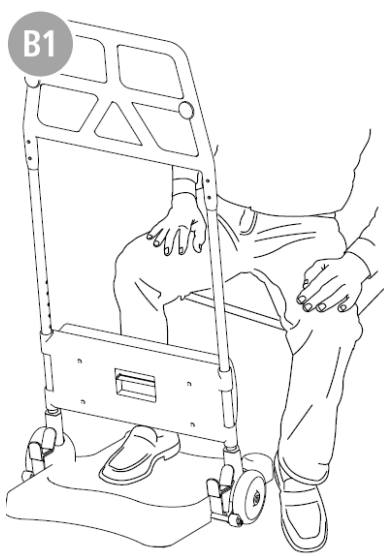

第二步：調整腳靠墊高度並煞車。

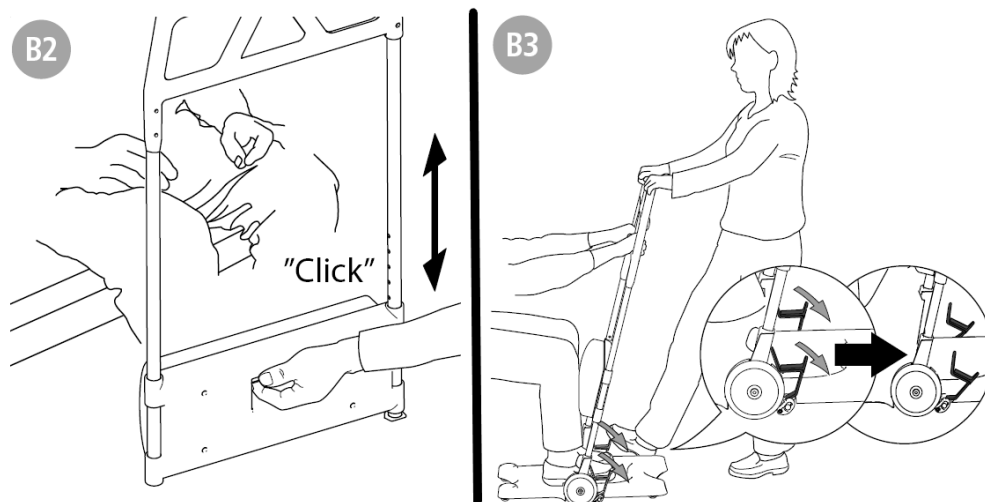


第三步：協助個案將手放置在把手上。

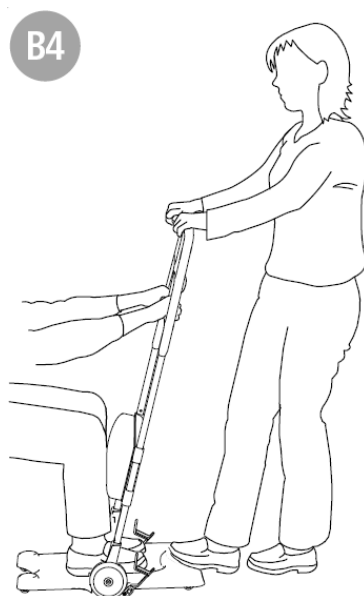

第四步：協助個案起身站立(三種方式)。


第一種：個案上半身活動力良好，且下半身略可支撐(操作時不須助起帶)。

讓個案雙手自行出力將身體拉起。

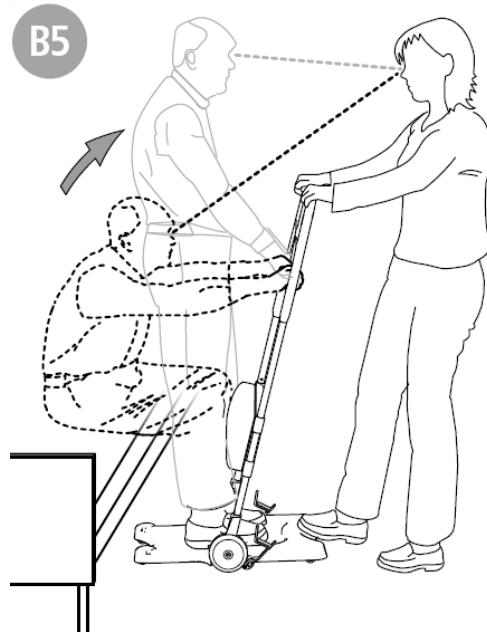

第二種：個案上半身無力但手能稍微出力協助站起，下半身略可支撐(操作時需助起帶，一人操作即可)。





先將助起帶一邊紅色拉帶扣至移位機把手旁的扣環上，且助起帶黑色部分中心置於尾骶骨位置(注意止滑面貼近人體)，一腳踩住腳踏板，一手扶著扶手，另一手拉起助起帶另一邊紅色拉帶部分後，扣置另一側把手旁扣環上。(如下圖)

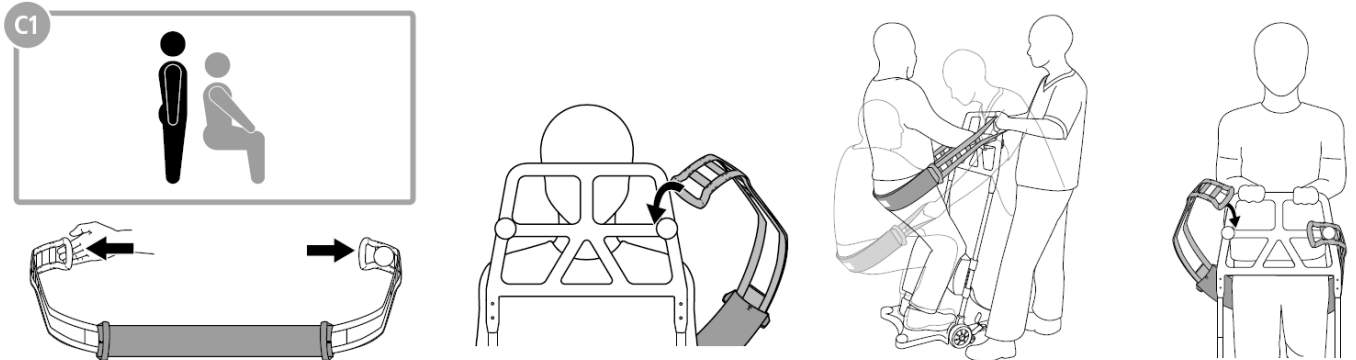

第三種：個案上半身只剩手稍能抓握。(操作需兩個人搭配助起帶)


先將助起帶黑色部分中心置於尾骶骨處(止滑面貼近人體)，兩人一人一邊拉助起帶黑色部分上的扣環，將個案拉起後拉帶紅色部分扣置扶手旁扣環上。(如下圖)

C2

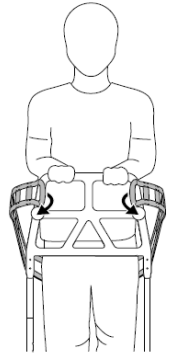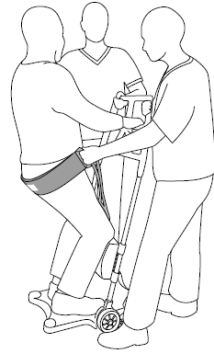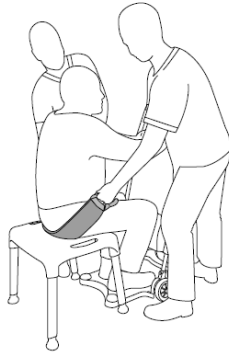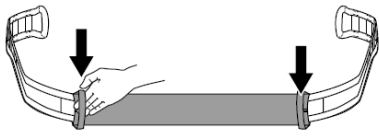


第五步：解開煞車，將個案移至所需位置後，將其慢慢放置在座位上。


B6

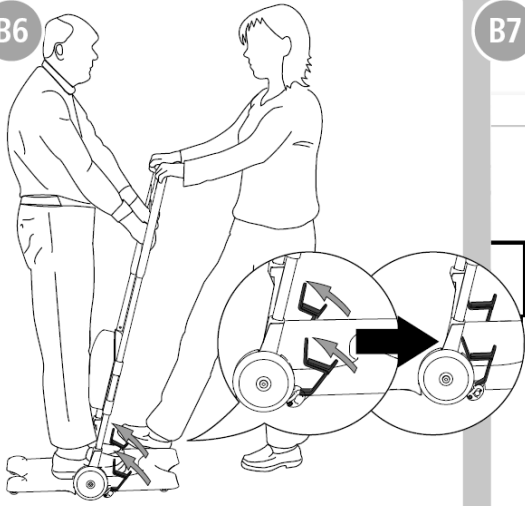

B7

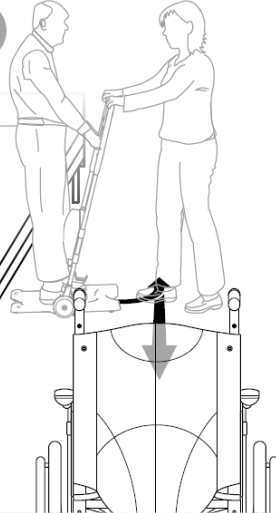

B8

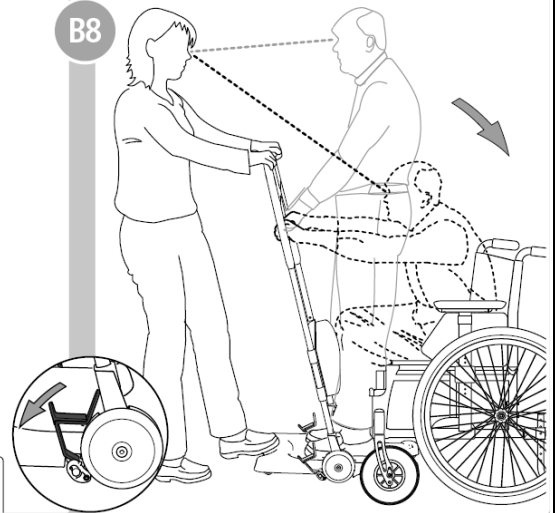

注意事項

1. 操作本移位機者須經過廠商教學認證。
2. 助起帶有分止光滑面跟止滑面，止滑面靠內側貼近人體，光滑面靠外，請注意使用。