

產品名稱

管灌飲食訓練模型

產品照片



內容物

型號:MW8

1. 上半身模型本體*1
2. 支撐台(設定為 30 度) *1
3. 排水用管*1
4. 漏斗*1
5. 量杯*1
6. 潤滑劑*1
7. 管灌飲食側剖圖模型*1
8. 透明胸腔解說墊*1
9. 使用說明書*1

使用目的

使用本訓練模型可訓練經口、經鼻的管灌飲食、插管技巧、胃造口護理、注入營養劑及灌食聽診，讓學生在課堂上便能習得臨床所需技能。

功能設計:

模擬成人構造之上半身模型，附模擬胃可做接近臨床的管灌練習

一、可插入口、鼻導管

使用半坐位的姿勢，可練習經口鼻的導管插入技術。

二、可聽診氣泡音確認導管到達位置

導管插入後，能以聽診器聽取腹部的氣泡音確認導管是否已到達胃內。

三、進行胃造口護理

可實習裝著胃造口導管的護理。胃造口也可聽診氣泡音做確認。

四、練習注入營養劑並學習管灌飲食整套流程

可經口鼻管、胃造口注入營養劑。胃的容量有 200cc 以上。能藉由插入口鼻腔的導管、氣管切開用管、胃部導管以確認路徑。

