

產品名稱

沐廁椅

產品照片



內容物

型號:80229270

具洗澡椅、便盆椅功能的帶輪沐廁椅
一台

使用目的

一. 讓行動不便之個案乘坐, 協助其完成如廁、沐浴等需求。通用設計, 讓更多不同族群都能夠使用。

二. 功能設計:

扶手: 快拆式的設計, 讓轉移位更輕鬆方便, 不會造成阻礙。

特殊骨架設計: 鋼管一體成型的設計, 沒有焊接點、螺絲鎖點, 更堅固、更耐用, 且不會有螺絲生鏽鬆動問題, 載重達 130 公斤, 能直接推入馬桶, 不須額外的轉移位。


踏板: 多段高度調整, 能符合不同身高族群使用, 在如廁時能調整至適當位置助於排便。獨特的曲面防滑設計, 能順應腳掌弧度, 能輕鬆且舒適地將腳掌放上。

椅座後方開口設計: 減輕尾骶骨負擔, 久坐不怕褥瘡, 且能夠協助在沐廁椅上穿脫尿布。

使用步驟(請將步驟分解說明, 如第一步...)

『扶手拆裝』

將扶手與主體連接處的橘色卡榫打開，即可將扶手抽出(如下圖)，如欲裝回扶手，僅需查回扶手後將卡榫壓上即可。

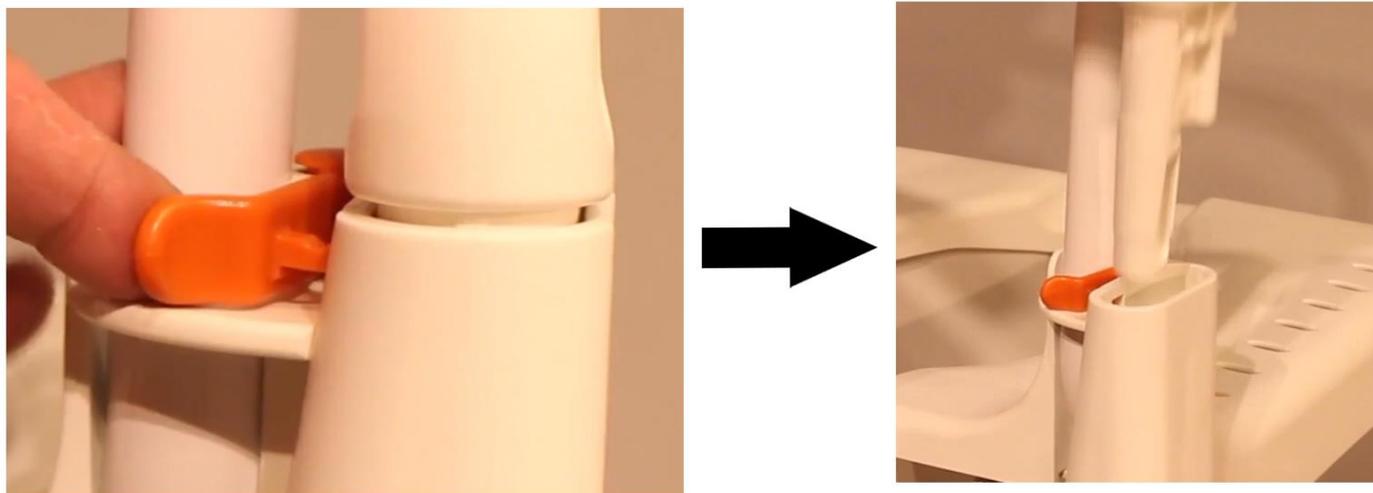

『踏板調整』

將踏板向外拉至所需高度的凹朝處放置即可(如下圖)。




『便盆及便盆軌道放置』

將”圖一”便桶軌道兩處插進”圖二”沐廁椅底部兩處相對應標號插槽處，即完成一側安裝(如圖三)，再將另一支軌道插入另一側相對應位置即完成安裝。



圖一

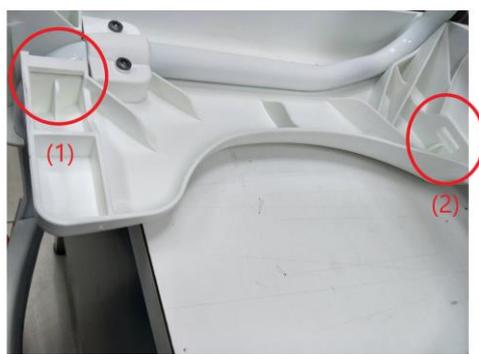

圖二



圖三

『煞車』

第一步:用腳踩踏”圖一”箭頭位置，即四個輪子上方橘色部分，即完成煞車動作。如需解除，僅須用腳輕輕踢一下”圖二”箭頭處即可。



圖一



圖二

注意事項

1. 請避免直接站在踏板上，以免造成危險。
2. 本產品為居家使用，不建議推出戶外使用。