

產品名稱

帶輪型助步車(助行椅)

產品照片



1. 背靠
2. 座墊
3. 置物袋
4. 拐杖架/傘架

5. 推手握把
6. 煞車握把
7. 握把高度調節彈扣
8. 後輪
9. 前輪

內容物

1. 後輪:175 x 43 mm , PU 胎。
2. 前輪:190 x 43 mm , PU 胎。
3. 座高:54 公分。
4. 座深:25 公分。
5. 座寬:45 公分。
6. 重量:5.8 公斤。
7. 總高:86~97 公分。
8. 總寬:64 公分。
9. 總長:76.5 公分。
10. 載重:136 公斤 (最大)。
11. 弧形寬版靠背帶, 提供舒適支撐。
12. 隨車附購物袋與小型置物拐杖架。
13. 輕量化鋁合金車架結構, 車架可收折。
14. 推手/握把高度可調。
15. 下壓式固定剎車。
16. 所有尺寸±5%。
17. 顏色以實品為準。

使用目的

有椅子坐、可以放東西, 適合外出需求的助步車便很適合長輩, 隨車附購物袋與小型置物拐杖架, 能作為長輩的小小行李箱且方便置放拐杖。

使用步驟(請將步驟分解說明, 如第一步...)

使用說明



- **展開**
拉開車架, 雙手朝內同時將座墊兩側下壓, 聽到“喀”一聲即完成。



- **乘坐**
助行器展開後, 將剎車握把下壓完成鎖固(駐車), 即可完成乘坐。



● 煞車

1. 行駛過程若要煞車，只需將握把向上提拉即完成煞車動作。
2. 握把向下扳動，會聽到“喀”一聲即為完全固定煞車。



隨車附帆布購物袋，四點式固定，可單獨取下使用



● 安裝置物袋

- 展開助行器，將置物帶兩側扣環掛上座管前端，再將魔鬼氈繫於車架管上。
置物袋附肩背帶，可單獨取下使用。



● 調節握把高度(彈扣式)

- 將車體展開後，左右兩邊彈扣固定鎖，將其談扣按壓後，有五個孔位高度可供使用者調整至自身適合高度。



小型置物架組，上方黏扣帶方便固定拐杖或傘，下方底座有排水設計



拐杖架/傘架放置完成後
上方用 魔鬼氈粘合即可固定。



後輪雙內側皆附有防傾桿，
並整合安全防滑後踏管功能



彈扣式按壓快拆前輪，
出門載運更省行李空間



高強度帆布座墊，整合收
折拉繩，一個上拉動作即
俐落完成車架收折



左右收合後車架可直立，
收納體積小不佔空間

注意事項

1. 拉開車架，雙手朝內同時將座墊兩側下壓，需確定有聽到”喀”一聲，完成產品展開動作。
2. 展開後，將剎車握把下壓，完成鎖固(駐車)，完成乘坐前動作。
3. 調節握把高度(彈扣式)，左右兩邊彈扣固定鎖握把高度將其彈扣按壓後，使用者將握把高度調整至自身適合高度，需確定彈扣已經固定在孔洞上，完成調節握把動作。