

產品名稱

移動式沙發

產品照片



內容物

型號:FR-31TR

高背輪椅具仰躺、空中傾倒型移動式沙發一台

使用目的

一. 讓行動不便之個案乘坐, 一張好坐的椅子可以讓個案更願意乘坐, 避免因為椅子的不適而迫於躺回床上, , 能夠坐就不要躺為復能精神之一, 鼓勵個案下床也有利於個案心肺功能。

二. 功能設計:

高背: 讓軀幹/頭部控制不佳的個案有個穩定支撐。

空中傾倒: 1. 協助將壓力從臀部分散到背部, 以避免壓瘡的產生。

2. 防止軀幹穩定性不佳個案乘坐輪椅時向前滑落。

仰躺: 1. 需搭配全身滑板移位時, 可採平躺 最多達 174 度。

2. 個案髖關節攣縮無法坐挺時可調整到合適角度 例如: 髖關節攣縮 120 度。

3. 外出時間較長時希望個案可以躺著休息 或換尿布時可採此姿勢。

子母輪設計: 以利於狹窄空間活動, 並可橫向靠近照顧床 降低照顧者的負擔。

扶手、踏板設計: 扶手高達 10 段高度調節以利於不同身高個案之使用。

無需拆裝之設計, 可使得操作上更加簡單. 便利。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步…)



『空中傾倒』

第一步:操作右手邊灰色把手之後將輪椅向背部移動 即可完成『空中傾倒』。

第二步:若從傾倒姿勢要回端坐姿勢時。操作右邊黑把手之後將輪椅朝前側移動即可。*如圖 1

『仰躺』

第一步:操作左邊黑色把手之後將輪椅向背部移動 即可完成『仰躺』。

第二步:若從仰躺要回端坐姿勢時。操作左邊黑色把手之後將輪椅朝前側移動即可。*如圖 1



『扶手』

第一步:操作扶手側方按鈕(左右兩側皆可操作)向上撥之後將扶手向下/向上移動(按鈕持續壓著)聽到”喀”一聲即為固定。共可調整 10 段不同高度。*如圖 2



『踏板』

第一步:向外翻

第二步:向後側移動*如圖 3

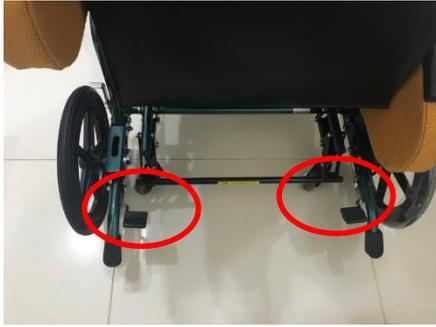


圖 4

『煞車』

第一步:講腳放置於踏板處向下踩踏即可完成煞車，如需解除煞車 向上撥動即可。*如圖 4



圖 5

可橫向移動，便於靠近床邊。



向床上移位時，無需旋轉，一次完成。

最小旋轉半徑71.5cm，便於在狹小地方轉彎。

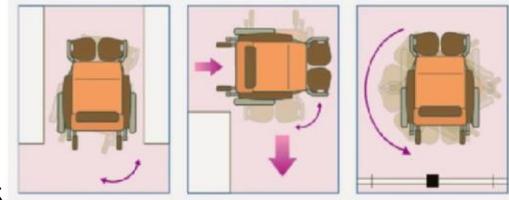


圖 5

『子母輪』

第一步:採下中間橫桿即可使用子母輪(左右平移)，切記在此狀況下煞車是無法作動的，取消子母輪請將中間橫桿往上移動即可。*如圖 5

注意事項

1. 操作後方把手時請一次操作 1 個即可，若同時操作 2 個功能會造成兩者都作動反而失去目的。
2. 個案起身/坐下前時請務必先將腳踏板收起，並且不可踩踏踏板上下輪椅 避免造成危險。
3. 請務必留意子母輪作動情況下是無法煞車的
4. 下坡請倒退推行
5. 安全載重為 100KG