

## 產品名稱

8 件式穿戴式褥瘡護理模型

### 產品照片



### 內容物

型號：M69

1. 褥瘡形成說明模型 4 種
2. 第三度 1 種
3. 第四度 2 種
4. 治療中的褥瘡 1 種
5. 褥瘡護理用皮膚(與說明用模型同型)
6. 彩色繪圖用具(水彩)
7. 筆
8. 調色盤
9. 盒子

## 使用目的

了解褥瘡經過說明及褥瘡照護實習

## 使用步驟

功能設計：

褥瘡經過說明用模型及護理用皮膚各四種的模擬套組


步驟一

1. 將護理用皮膚上色。(圖一)
2. 準備 100ml 的生理食鹽水、消毒紗布、彎盆。(圖一)



(圖一)

3. 選擇欲練習的褥瘡護理用皮膚。(圖二)

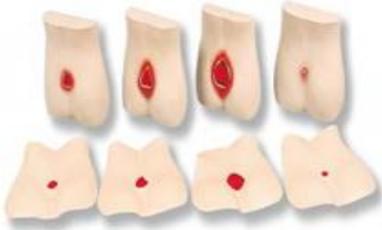

(圖二)

4. 可選擇相同程度的褥瘡模型置於附近。
5. 用生理食鹽水及消毒紗布於護理用皮膚作傷口清潔練習。

### 注意事項

1. 請以清水沖洗褥瘡護理用皮膚。
2. 自然風乾後保存於收納盒。