


產品名稱

移位滑板

產品照片

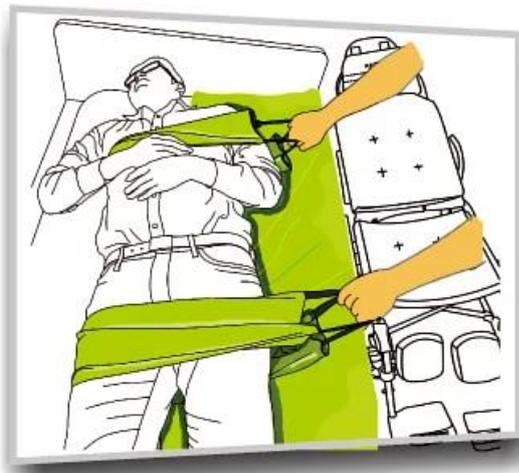

內容物

全身型滑板*1

移位拉帶*2

使用目的

仰躺平移、提供靈活、彈性的 Flyer 移位滑板，有效提高照顧者位移效能，輕鬆溫柔達到移位目的。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

- 搭配輔具：介護輪特製輪椅(仰躺型)，手動/電動床(具升降功能)。

床=>輪椅移位

將個案翻身後，使移位滑板置入於身體下方



此時個案可能僅與滑板接觸 1/3，先將腳移動靠近滑板並一手位於肩膀一手位於骨盆將個案往照顧者身上移動（採平拉方式），使得身體至少與滑板接觸 1/2



將移位拉帶一條從個案脖子下方置入後平移至胸口(如個案軀幹控制差 拉帶需從外側包覆手臂)

另一條拉帶從個案膝蓋下方置入後平移至骨盆



將輪椅靠近床緣 並於靠近床緣處扶手下降/拆除 靠近照顧者側扶手拉高

電動床高度調整至略高輪椅 5-10 公分處，照顧者雙手打直平行往自己身體側拉動個案至輪椅上，此時移動速度請適中，之後即可抽出滑板以及拉帶即可完成床=>輪椅移位



輪椅=>床移位

將輪椅打平後，將個案於輪椅上翻身後將滑板置入於個案身體下方



將電動床降低至低於輪椅椅面，靠近自己側扶手降低/拆除後採平行推移個案至床面即可將滑板抽出



注意事項

- 搭配輔具：介護輪特製輪椅，手動/電動床(具升降功能)。