

產品名稱

醫療級工作車

產品照片



內容物

1. 長 59x 寬 56x 高 101cm。
2. 車體整體塑鋼材質組成，推動靈活輕巧。
3. 附活動隔板可自行調整，方便置放物品。
4. 抽屜設有滾珠式滑軌，無噪音、使用順暢輕便。
5. 抽屜設有防滑暗扣，防止推動時抽屜滑出。
6. ABS 一體成型拉板，可供護理人員寫字或其他使用。
7. 含 2 個-9L 的垃圾桶。
8. 附 1 個置物盒。
9. 5" 塑鋼車輪，防塵、防夾毛髮。

使用目的

可將多類耗材產品，分層/ 分格置放，一目了然。縮短尋找材料的時間浪費。


使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步…)

一、操作說明：

1. 抽屜：

(1)採用三段式鋼珠滾珠滑軌，可使抽屜全開以方便拿取物品。

(2)每個抽屜右側把手上附 1 個隱藏式固定器，此固定器往左扳抽屜即可拉出，抽屜關上時固定器即可安全卡住，車體推動時抽屜不滑落。

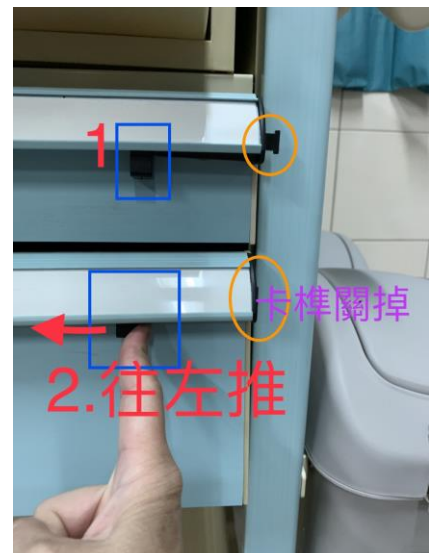



2. 置物盒:於車體左側,為ABS 塑鋼射出一體成型,內附塑鋼分隔板2 片,使用者可依需求自由分隔,置物盒若有污垢可拿出水洗。



3. 藥箱：

(1) 藥箱：為手提式（1 提 8 人份），使用時可整個提出作交換。





(2) 塑鋼藥盒：雙面對開共計 16 個，藥盒外附名牌插座標示，可使用電腦及列表機製作列印於紙卡上，將大小適中的紙卡置入藥盒手把標示座內。



4. 垃圾桶：於車體右側 x2 個，桶蓋具扣把裝置，裝上清潔袋後蓋子可牢固不掉落。



二、保養說明：

1. 清潔:抽屜及車體可使用一般清潔劑、去漬油等。或以布類用柔軟清潔用品擦拭。
2. 台面清潔:用一般清潔劑或去漬油,酒精部分僅限於 40%內之酒精。
3. 抽屜滑軌:每半年在滑軌鋼珠上清除污物灰塵,再上黃油。

※ 以上之保養如有無法排解者，請電服務專線(02)22690546 洽服務人員處理。

注意事項

三、注意事項

1. 車體下方抽屜開啟時, 應注意扣鈕開關。
2. 車體推動時, 應注意煞車是否解除。
3. 輪子: 行進間無法維持直線前進或推動時, 則檢視輪子與輪座間是否卡住毛髮或異, 若有將之去除。
4. 腳輪: 每季應檢視螺桿定位是否正確到位, 如有鬆脫則立即上緊。

。