

產品名稱

塑鋼換藥車

產品照片



內容物


1. 整體規格：L600*W500*H1000mm±3%。
2. 頂板：凹面設計，材質為 ABS 塑鋼一體成型。
3. 頂板上附門形圍欄：可平穩置放棉罐，並經粉體塗裝。
4. 伸縮式拉板：材質為粉體塗裝，位於車體前方。
5. 把手：位於車體側面，鋁合金材質。
6. 車體支柱：尺寸為 50*50mm，為鋁合金材質，韌性強耐用度高。
7. 側面封板：為塑鋼 ABS 材質。
8. 藥物分隔區：附塑鋼分隔板，可根據藥品大小自由分隔。
9. 支柱上附不銹鋼換藥碗及不銹鋼器械盤各一個。
10. 棉罐置放架(位於頂板上方)。
11. 抽屜：
 - (1)鋼板烤漆，共計二層抽屜：每層抽屜內附 PP 盒 4 個(二層共計 8 個)。
 - (2)抽屜把手：鋁合金材質，內附隱藏式固定器，附名牌插座，可標示單位、藥品名稱。
12. 輪子：φ5" 對角煞車輪。
13. 附塑膠垃圾。
14. 所有尺寸：±3%

使用目的

1. 預防感染傷口及早發現感染徵象
2. 保持傷口清潔，促進傷口癒合及舒適度

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 頂板上門形圍欄：可依需求放置棉罐等。
2. 伸縮式拉板：使用時，從前面拉出，可供病歷填寫等使用，用畢輕推入，不佔空間。
3. 中間分隔區：附塑鋼分隔板，可依需求自由分隔。
4. 抽屜：
 - (1)開啟：將把手內緣右側所附之隱藏式塑鋼固定器(黑色卡榫扣鈕)往左扳，即可開啟抽屜。
 - (2)關閉：輕推抽屜到底，卡榫扣鈕自行扣上，即可關閉抽屜，移動時不滑動。
5. PP 藥盒：置於抽屜內，每個藥盒均附 2 片分隔板，可依藥品多寡調整空間。
6. 搖蓋式垃圾桶：丟廢棄物時，順勢將上蓋往下壓，即可投入。
7. 腳踏式垃圾桶：丟廢棄物時，腳踏垃圾桶踏板，上蓋順勢上昇，即可投入廢物。
8. 對角剎車輪：
 - (1)車體推動：彈起輪子之剎車片，即可解除剎車狀態，輕易移動車體。
 - (2)車體駐停：壓下輪子之剎車片，即可剎住車體，不會移動。
9. 支柱上附不銹鋼換藥碗及不銹鋼器械盤各一個。

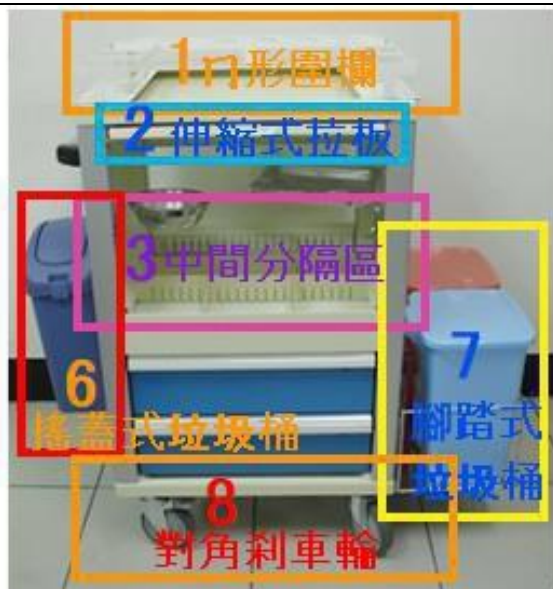

注意事項

1. 一般清潔：
 - (1) 抽屜及車體可使用一般清潔劑、去漬油等，以布類或柔軟清潔用品擦拭之。
 - (2) 不銹鋼器械盤及棉花罐可使用一般清潔劑等，以布類或柔軟清潔用品擦拭之。
2. 抽屜滑軌：在滑軌鋼珠上清除污物灰塵，再上潤滑油。
3. 輪子：檢視螺桿定位是否正確到位，如有鬆脫則立即上緊；行進間無法維持直線前進或無法推動，則檢視輪子與輪座間是否卡有毛髮或異物。