

產品名稱

床邊扶手

產品照片



內容物

型號: BZ-N03

口字型設計的床邊扶手一臺

使用目的

一、起身不再危險、煩惱，寢室、床、沙發皆可對應

二、功能設計：

安全：夜間蓄光貼片。

穩固：連續起身動作不傾倒。

好握：握把採用直徑 32mm。

免施工：自由設置對應靈活。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

『起身』

第一步:翻側身雙手握住前端扶手，單腳屈膝(如圖 1)。

第二步:一隻手撐向床面、另隻則抓住扶手撐起上半身，雙腳放至地面(如圖 2)。

第三步:坐起身，單手靠著扶手側邊，另外手靠床支撐向前傾起身。

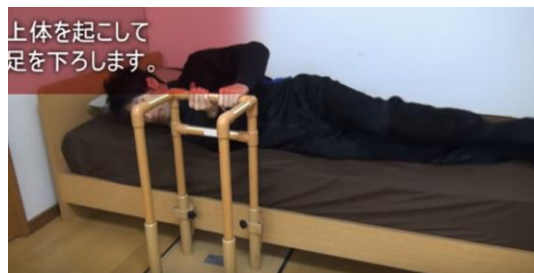


圖 1



圖 2



圖 3

注意事項

1. 移動時請注意底板部分及扶手。
2. 請勿安裝在浴室、更衣室、洗手間等潮濕的地方。
3. 請勿安裝在室外或陽光直射的地方。
4. 不要省略螺絲等必要零件。
5. 請勿拆卸、改造或加工。