

產品名稱

手壓式不鏽鋼點滴架(塑膠五爪底座)

產品照片



內容物

1. 點滴架高度控制採用手壓式開關。
2. 點滴架高度可從 165cm 調高到 250cm。
3. 上架採用 $\phi 6$ 分(19mm)x1.0mm 不鏽鋼圓管。
4. 下架採用 $\phi 1$ "(25mm)x1.0mm 不鏽鋼圓管。
5. 不鏽鋼點滴架，塑膠五爪底座為直徑長 58cm。
6. 附五個 2" 活動塑膠輪。
7. 支架整體材質為不鏽鋼材質。
8. 底座為塑膠五爪底座。
9. 所有尺寸 $\pm 5\%$ 。
10. 顏色以實品為準。

使用目的

方便需要輸液時的專用吊架，不因場地而受限

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

當使用者欲調整點滴架高度時，將手壓式開關往下壓，將點滴架高度調到合適的位置，

在決定高度後，將手壓式開關放開，即可固定高度。

將手壓式開關往下壓，
將點滴架高度調到合適的位置
放開後手壓式開關即可固定高度



注意事項

確定手壓式開關有固定好