

## 產品名稱

電子給藥器

### 產品照片



### 內容物

型號:model 660

可以提醒和分發藥物，以便及時正確地使用藥物的電子給藥器一臺。

## 使用目的

一、監控鎖定電子給藥器有助於確保及時正確地服用藥物和維生素。

二、功能設計：

**大螢幕：**螢幕尺寸大、容易讀取。它顯示正確的時間以及日期、下次供藥的提醒時間。

**聲音和視覺提醒警報：**每天可編程 1 至 6 次，以提供聽覺和視覺藥物提醒警報。

**家用電源對接底座：**可為設備供電。

**安全防篡改鎖：**防止系統篡改和藥物濫用。

**藥盤：**配有 2 個藥盤，額外的藥盤可以存放在現場或非現場，以加快補充。



## 使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

### 『設定時間與日期』

第一步:按下 Set Clock 一次，數字「時」會閃爍，使用+或-調整「時」(包括 AM/PM)。

第二步:按下 Set Clock 第二次，確認該設定，並且「分」開始閃爍，依照上述同樣的方法，調整「分」，使用 Set Clock 確認設定。



第三步:以此類推，將「日」、「月」、「年」依次設定完畢。

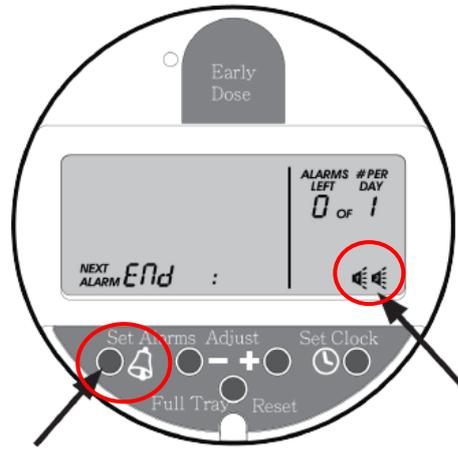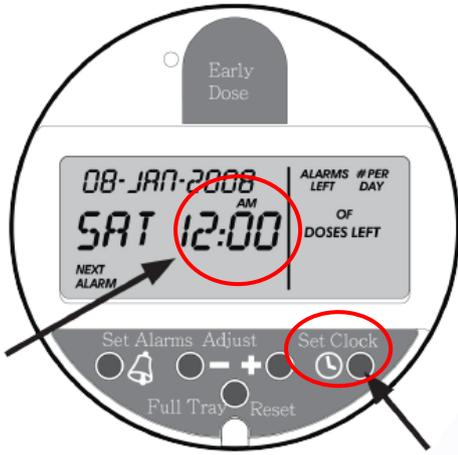

### 『設定警告音』

第一步:按下 Set Alarms 一次，鈴聲符號閃爍，使用+或-來循環設定鈴聲。(如上圖右)

第二步:按下 Set Alarms 後儲存鈴聲設定，並且#Per Day 開始閃爍。

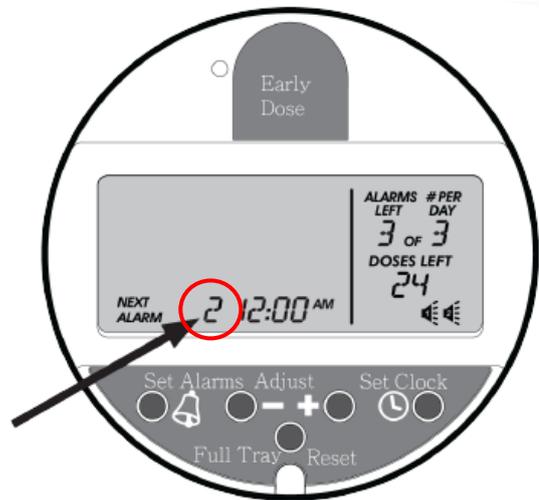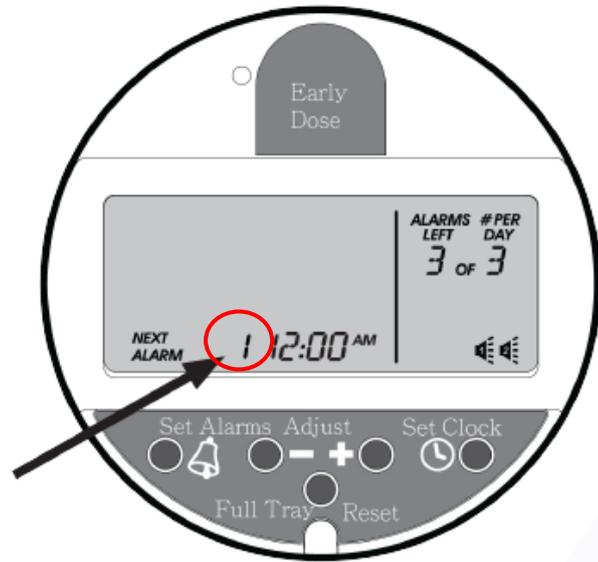

### 『每日劑量』

第一步:調整#Per Day 須使用+或-來增加或減少，該次數是在1天之內警告您的次數。

第二步:按下 Set Alarms 第二次來儲存設定值，並且前往下一個設定。Alarms Left 為自動調整，下個設定將調整 Next Alarm。(如上圖左)

### 『給藥時間』

第一步:透過+或-來循環調整 Next Alarm 的次數。End 也在循環之中。循環的數值起始值為 1，這代表是一天的第一劑量。

第二步:在數字 1 閃爍的時候，按下 Set Alarms 後，可開始調整時間。「時」為第一個調整的數字。

第三步:使用+或-可增加或減少數字，注意 AM/PM 的差別。

第四步:按下 Set Alarms 後可儲存，並進行下一個設定。「分」開始閃爍。



第五步:重覆上述的方式設定「分」，當按下 Set Alarms 之後，Next Alarm 開始閃爍。

第六步:循環設定 Next Alarm 數字，然後以上述的方式設定每次的 Alarms Time。

第七步:當 Alarms Time 已經都正確的設定完畢之後，直到 End 出現後按下 Set Alarms 結束。

### 『填充藥盤』

第一步:依照您的需求選擇適當的 Loading Guides Discs，依據您填裝藥品的時間，選擇 Start 在正確的位子上的 Loading Guides Discs。(如下圖)

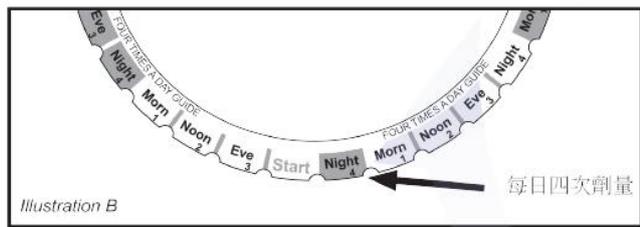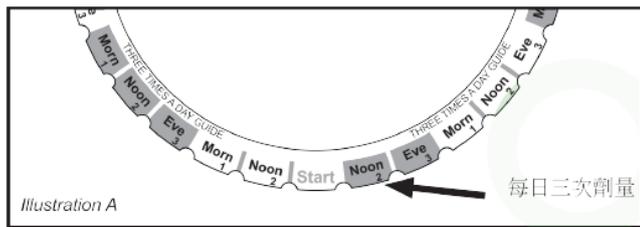

## 注意事項

1. 當您重新裝填藥劑時，請重新確認一次藥盤擺放是否正確，以及 Loading Guides Disk 放在正確位置上。
2. 絕對禁止把藥劑放在 Start 位置。